


Para samman CRM07/08 med larmmatta eller sänglarm med sändare.

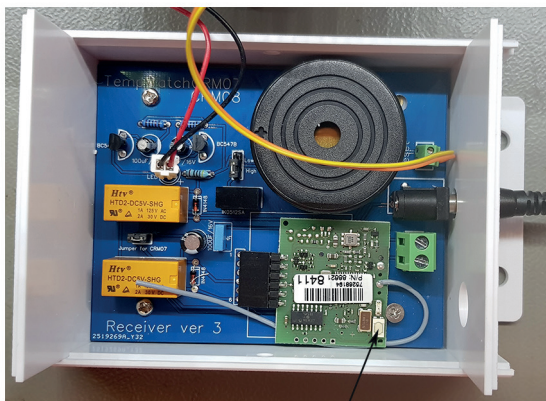

PROGRAMMERINGSKNAPP

Om du vill para samman en larmmatta eller sänglarm med Mottagaren CRM-07 (inget larmsystem) eller CRM-08 sjukhus med larmsystem) gör följande:

Lokalisera den lilla tryckknappen på mottagarkortet och lysdioden (LED) bredvid. Lysdioden är släckt vid normal användning.

Tryck en gång på tryckknappen: Nu skall LED blinka hela tiden

Tryck en gång till på tryckknappen: Nu skall LED blinka 2ggr och pausa några sekunder och fortsätta blinka 2 ggr.

Tryck en gång till på tryckknappen: Nu skall LED blinka 3ggr och pausa några sekunder och fortsätta blinka 3ggr.

Sätt foten på larmmattan och håll den nertryckt. LED tänds och lyser fast sken ca 3 sekunder och släcks igen. Nu har larmmattan parats samman med mottagaren.

Tryck nu en gång till på tryckknappen!

LED slocknar men varje gång larmmattan aktiveras, kommer LED att blinka snabbt och du kan även höra reläet klicka till. Allt är klart!

www.fallprevention.se

TempWatch AB

Kuskvägen 4, 19126 Sollentuna

Tel: 08 5333 7660